

Rückenstützbandage nach Prof. Lindemann (elastisches 2/3 Mieder für Damen und Herren)



Rückenstützbandage nach Prof. Lindemann

(elastisches 2/3 Mieder für Damen und Herren)



Durch die Kompression des Leibes wird eine Haltungsänderung im Sinne einer Aufrichtung beobachtet. Die Wirbelsäule sowie die Rückenmuskulatur werden entlastet. Durch Nachlassen der Schmerzen wird eine Schonhaltung zugunsten einer aktiveren Bewegung aufgegeben.

INDIKATION (nach Prof. Petersen)

- Statisch muskuläre Insuffizienz/Osteoporose, in Verbindung mit Reklinationszügen im Brustwirbelbereich.
- Osteochondrose, Spondylose, Spondylarthrose, leichte Skoliosen, Bastrup-Syndrom, Spondylolisthese 1. Grades.
- Begrenzt nach lumbaler Nukleotomie.
- Nicht geeignet bei entzündlichen Prozessen oder Spondylolisthese 2. und 3. Grades.

VERORDNUNG

Rückenstützbandage nach Prof. Lindemann oder auch elastisches 2/3 Mieder.

FARBEN / BESONDERES

Die Rückenstützbandagen können in folgenden Stoffen gefertigt werden:

1. Köper, hautfarben - 65% Dacron, 35 % Baumwolle, haut
2. Jacquard, 100 % Baumwolle, haut

Der Futterstoff ist aus 100 % Baumwolle. Alle Stoffe sind waschbar, jedoch nicht über 30°.

VERSCHLÜSSE

Wir bieten Ihnen serienmäßig an: Haken und Ösen links, Schnürung vorn oder seitlich. Eine einfachere Möglichkeit stellt der Klettverschluss dar, der besonders für ältere Patienten geeignet ist, die Behinderungen der Hände haben.

Selbstverständlich fertigen wir auch Verschlüsse nach Ihren Angaben.


ZUSÄTZE



Innenbinde aus 20 cm breitem gefüttertem Tüllgummi mit Haken- und Ösenverschluß.



Hosenzwickel zum nachträglichen Einsetzen mit der Möglichkeit, durch Klettenverschluß den Hosenzwickel zu entfernen.

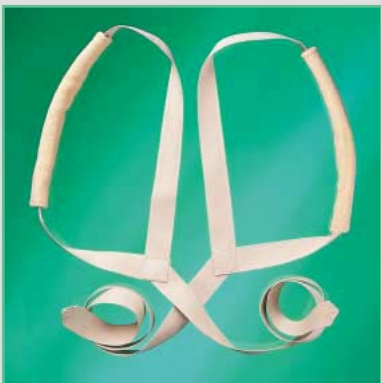

Reklinationszüge mit gepolstertem Achselteil



Unterstützungslasche mit Klettenverschluß




Gurte mit Klettenverschluß

Zum Fertigstellen der Bandage bieten wir an:

Einfäßgummi, Besatzstreifen in 21 und 25 mm, Strumpfhalter (schmal/breit), elastische Spiralstäbe und feste Rückenstäbe.

HERSTELLUNGSTIPS

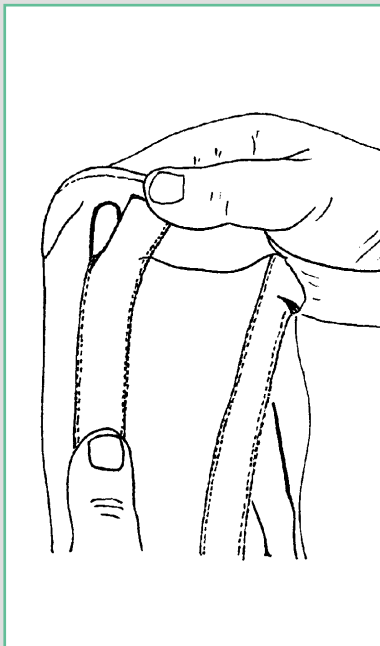

Zum Waschen der Rückenstützbandage empfiehlt es sich, die festen Stäbe durch einen kleinen Einschub an der oberen Miederkante auswechselbar zu machen.

Hinweis:

Ihre Rückenstützbandagen erhalten durch Einnähen von Firmenschildern eine persönliche Note.

Und nicht zuletzt: Wir realisieren Ihre Ideen und arbeiten natürlich auch nach Ihren Angaben.

Machen Sie einen Versuch!

Figesta
MIEDERFABRIK

Ludwig-Erhard-Strasse 19 • 30982 Pattensen
Tel.: +49 (0) 51 01 / 99 96 - 0 • Fax: +49 (0) 51 01 / 99 96 - 66